

Інструкція із застосування медичного виробу

Гель для ультразвукового дослідження

Призначення: Призначений для забезпечення чіткої та безперебійної передачі ультразвукових хвиль шляхом виключення повітря між шкірою та датчиком під час будь-якого ультразвукового дослідження, доплерівського ЕКГ та ін.

Характеристики: Прозорий водорозчинний гель. Має високий ступінь в'язкості. Речовини, що містяться, не пошкоджують датчики. Не містить сіль, формальдегіди, що забезпечує комфортне УЗД. Після проведеного дослідження легко видаляється вологою серветкою.

Інструкція із застосування:

1. Під час роботи використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, одноразові рукавички, тощо, і діяти у відповідності з діючими нормами.
2. З дотриманням правил асептики нанести гель на очищену ділянку шкіри. Кількість гелю залежить від площі досліджуваної ділянки.
3. Використати за призначенням. УЗД дослідження відбувається з мінімальним натиском датчика на досліджувану ділянку.
4. Після проведеного дослідження видалити залишки гелю вологою серветкою.

Властивості:

Гіпоалергенний
Нетоксичний
Не подразнює шкіру
Водорозчинний
Легко очищується
Не містить формальдегіду та солі
Без запаху

Інгредієнти:

Деіонізована вода, карбомер, триетаноламін, монопропіленгліколь, бензиловий спирт, метилхлороізотіазоліон.

Застереження:

1. Гель для УЗД забороняється приймати внутрішньо.
2. При контакті з очима, промити очі проточною водою протягом 5 хвилин.
3. Не використовувати після закінчення терміну придатності.
4. Використовувати лише за призначенням.
5. Тільки для одноразового використання.
6. Для використання кваліфікованим персоналом.

Умови зберігання:

При температурі не вище 35°C, подалі від прямих сонячних променів, у прохолодному та сухому місці

Термін придатності - вказано на упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: KAF GRUP SAGLIK HIZMETLERI INSAAT SANAYI VE TIC.LTD.STI
Atakent Mah. 221 Sk. No:3A Rota Office A Blok Kat:14 D:83 Kucukcekmece/ Istanbul/ Turkey
Tel.: +90 212 4714200, www.kafgrup.com

КАФ ГРУП САГЛІК ХІЗМЕТЛЕРІ ІНСААТ САНАЇ ВІ ТІК.ЛТД.СТІ
Атакент Мач. 221 Ск. №:3А Рота Офіс А Блок Кат:14 Д:83 Кючукчекмедже/ Стамбул/ Туреччина
Тел.: +90 212 4714200, www.kafgrup.com



Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua