

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Аплікатори



**Вміст пакування:** Аплікатор, бавовняна верхівка, дерев'яний стрижень стерильний, одноразового використання.

**Призначення:** для взяття біологічного матеріалу для подальшого лабораторного вивчення, а також для обробки ран розчинами та іншими видами лікарських засобів.

**Область застосування:** широкого спектру використання, у тому числі, застосовується в лабораторіях, урології, гінекології, отоларингології

тощо.

**Характеристики:** Аплікатор являє собою гігроскопічний бавовняний тампон, який виготовлено шляхом намотування волокна за спеціальною технологією, що надає йому краплеподібну форму, зафіксований на дерев'яному стрижні.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити аплікатор з упаковки.
3. Медичний виріб готовий до використання. Тримавши аплікатор за край стрижня без ватного намотування, провести необхідні маніпуляції.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
3. Використати одразу після відкриття упаковки.
4. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,LTD  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province,  
222002, People`s Republic of China  
tel: 86-518-85476682, [www.syunmedical.com](http://www.syunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ "Джей Ес Україна".  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
(048) 766-91-61; [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)