

## Інструкція із застосування медичного виробу

## Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів

№ п/п	Розмір виробу
1	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 6 стерильний, одноразового використання
2	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 8 стерильний, одноразового використання
3	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 10 стерильний, одноразового використання
4	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 12 стерильний, одноразового використання
5	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 14 стерильний, одноразового використання
6	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 16 стерильний, одноразового використання
7	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 18 стерильний, одноразового використання

**Призначення:** використовується для видалення рідин з біологічних порожнин (аспірації вмісту з трахеобронхіального дерева), для санації і аспірації вмісту з ендотрахеальної і трахеостомічної трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнин.

**Характеристики:** Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду (PVC), складається з трубки та універсального конектора типу Вагон (Y-подібний конектор) з кольоровим кодуванням розміру. Має гладку поверхню та відкритий атравматичний дистальний кінець, що запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці - два латеральних вічка для ефективного дренажу. На конекторі катетера є отвір для ручного вакуум-контролю. Довжина катетера 50 см. **Інструкція із застосування:**

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. Вилучити катетер з упаковки.
2. Ввести катетер через ніс, рот або ендотрахеальну трубку до рівня, що необхідний для активної аспірації (згідно заздалегідь визначеної відмітки на катетері).
3. Підключити відсмоктувальне обладнання до конектора катетера та провести аспірацію.
4. Контроль рівня розрідження в катетері проводити перекриваючи пальцем отвір для ручного вакуум-контролю на конекторі.
5. Після закінчення аспірації від'єднати катетер від аспіраційного обладнання, видалити катетер.
6. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

**Застереження:**

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (EO). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Матеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,  
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

