

Інструкція із застосування медичного виробу

Пінцети стерильні



Вміст пакування: Пінцет 200 мм стерильний, одноразового використання.

Призначення: для захвату/утримання предметів і перев'язувальних матеріалів, ватних і марлевих тампонів під час лікувальних процедур і профілактичних оглядів.

Область застосування: гінекологія, отоларингологія, загальна хірургія, стоматологія та інші галузі медицини.

Характеристики: Виготовлений з ABS-пластику. Довжина 200 мм.

Спеціальна конструкція пінцета дозволяє запобігти перекосу робочих частин, забезпечуючи надійне утримання предметів без зайвих зусиль. Наявність насічки на внутрішній стороні робочих кінчиків пінцета також дозволяє міцно утримувати захоплений предмет. Поперечне рифлення для пальців на зовнішній поверхні браншів пінцета виключає можливість вислизання з рук під час здійснення маніпуляцій. Не вступає в реакцію з агресивними середовищами і дезінфікуючими засобами.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити пінцет з упаковки.
3. Медичний виріб готовий до використання.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати пінцет відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
3. Використати одразу після відкриття упаковки.
4. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,LTD
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province,
222002, People`s Republic of China
tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
(048) 766-91-61; www.jsukraine.com.ua