

## Інструкція із застосування медичного виробу

**Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені,  
колір блакитний**

**Призначення:** рукавички медичні оглядові JS призначені для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях.

**Характеристики:** виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу, не містять латексу. Довжина рукавичок не менше 240 мм. Нестерильні, не припудрені, текстурована поверхня пальців, мають валик на манжеті. Колір – блакитний.

Розмір виробу	Вага, г	Товщина долоні, мм	Товщина манжети, мм	Товщина пальця, мм
розмір S	$3.1 \pm 0.2$	$0.07 \pm 0.03$	$0.06 \pm 0.03$	$0.10 \pm 0.03$
розмір M	$3.5 \pm 0.2$	$0.07 \pm 0.03$	$0.06 \pm 0.03$	$0.10 \pm 0.03$
розмір L	$3.9 \pm 0.2$	$0.07 \pm 0.03$	$0.06 \pm 0.03$	$0.10 \pm 0.03$

**Інструкція із застосування:**

1. Перед використанням зняти з рук всі прикраси, вимити та висушити руки.
2. Дістати рукавички з коробки.
3. Перевірити цілісність рукавичок, не використовувати у разі пошкодження.
4. Одягти рукавички на руки, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій зняти рукавички та утилізувати відповідно до вимог чинного законодавства.

**Застереження:**

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Зберігати при температурі від 5 до 30°C.
3. Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну зберігання.
4. Тільки для одноразового використання!

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.  
50 пар (100 шт.) в упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Shandong Intco Medical Products Co., Ltd  
No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500  
Tel: +86 21 34978818, [www.intcomedical.com](http://www.intcomedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ “Джей Ес Україна”  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
Тел.: 38 (048) 7669161, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

