

Інструкція із застосування медичного виробу

**Рукавички медичні оглядові нитрилові JS нестерильні неприпудрені,
колір чорний**

Призначення: рукавички медичні оглядові JS призначені для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях.

Характеристики: виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нитрилу, не містять латексу. Довжина рукавичок не менше 240 мм. Нестерильні, не припудрені, текстурована поверхня пальців, мають валик на манжеті. Колір – чорний.

Розмір виробу	Вага, г	Товщина долоні, мм	Товщина манжети, мм	Товщина пальця, мм
розмір S	3.7 ± 0.2	0.07 ± 0.03	0.06 ± 0.03	0.10 ± 0.03
розмір M	4.0 ± 0.2	0.07 ± 0.03	0.06 ± 0.03	0.10 ± 0.03
розмір L	4.4 ± 0.2	0.07 ± 0.03	0.06 ± 0.03	0.10 ± 0.03

Інструкція із застосування:

1. Перед використанням зняти з рук всі прикраси, вимити та висушити руки.
2. Дістати рукавички з коробки.
3. Перевірити цілісність рукавичок, не використовувати у разі пошкодження.
4. Одягти рукавички на руки, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій зняти рукавички та утилізувати відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Зберігати при температурі від 5 до 30°C.
3. Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну зберігання.
4. Тільки для одноразового використання!

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.
50 пар (100 шт.) в упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Tel: +86 21 34978818, www.intcomedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ “Джей Ес Україна”
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: 38 (048) 7669161, www.jsukraine.com.ua

