

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Зонд урогенітальний ультра



**Вміст пакування:** Зонд урогенітальний ультра стерильний, одноразового використання.

**Призначення:** для взяття біологічного матеріалу з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри, а також з будь-якої доступної слизової оболонки (порожнини рота, ока, носу, глотки), що дозволяє провести біохімічний, цитологічний і бактеріологічний аналіз. Може бути використаний при конізації шийки матки. Зонд дозволяє проводити забір матеріалу при вузькому або стенозованому цервікальному каналі.

**Характеристики:** Зонд урогенітальний ультра виготовлений з поліпропілену. Складається з головки (робоча частина),

виготовленої з матеріалу дакрон і ручки (матеріал- поліпропілен). На ручці зонда є поперечна насічка, яка дозволяє при необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком та покласти її в пробірку/мікропробірку або контейнер для транспортування в лабораторію.

#### **Інструкція із застосування:**

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити зонд з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Занурити зонд в уретру або цервікальний канал.
4. Повільно повернути зонд в обидві сторони.
5. Вийняти зонд і перенести матеріал з ворсисті поверхні зонда на предметне скло або, при необхідності направити матеріал в лабораторію, відламати кінець зонда і помістити його робочу частину в транспортну пробірку або в контейнер.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати зонд відповідно до вимог чинного законодавства.

#### **Застереження:**

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці. В індивідуальній упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.  
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Tel.: +86-518-85476682, Fax.: +86-518-85466033  
[www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД  
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,  
Піпелз Републік Китай  
Tel.: +86-518-85476682, Fax.: +86-518-85466033  
[www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
Тел.: +38-094-9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)



UA.TR.099