

Інструкція із застосування медичного виробу (розширена)

Леза без системи безпеки, одноразові

№ п/п	Тип виробу
1	Хірургічні леза тип 11 стерильні, одноразового використання
2	Хірургічні леза тип 12 стерильні, одноразового використання
3	Хірургічні леза тип 15 стерильні, одноразового використання
4	Хірургічні леза тип 20 стерильні, одноразового використання
5	Хірургічні леза тип 21 стерильні, одноразового використання
6	Хірургічні леза тип 22 стерильні, одноразового використання
7	Хірургічні леза тип 23 стерильні, одноразового використання
8	Хірургічні леза тип 24 стерильні, одноразового використання
9	Хірургічні леза тип 25 стерильні, одноразового використання

Призначення: призначені для всіх видів хірургічних втручань.

Характеристики: Хірургічні леза виготовлені з нержавіючої або карбонової сталі. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Розмір (тип) виробу наведено в таблиці - Тип виробу (11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити хірургічне лезо з упаковки та приєднати його до ручки через спеціально призначений для цього отвір.
3. Використати за призначенням.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій від'єднати лезо від ручки.
5. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою радіаційної стерилізації (R). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка з фольги.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China
Tel.: +86 512 65799308, www.sterilance.com

Виробник: Стеріленс Медікл (Сучжоу) Інк.
№ 168 Путошань Роуд, Нью Дістріт, 215153 Сучжоу, Цзянсу, Н.Р. Китай
Тел.: +86 512 65799308, www.sterilance.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

