



## Інструкція із застосування медичного виробу

### Ланцет захищений з вертикальною активацією

| № п/п | Модифікація та розмір виробу                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 21G (1.8 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 2     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 21G (2.2 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 3     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 21G (2.4 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 4     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 23G (1.8 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 5     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 26G (1.8 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 6     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 26G (2.2 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 7     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 28G (1.8 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 8     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 30G (1.5 мм глибина) стерильний, одноразового використання |
| 9     | Ланцет захищений з вертикальною активацією розмір 30G (1.8 мм глибина) стерильний, одноразового використання |

**Призначення:** використовуються для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної крові на аналіз.


**Характеристики:** Ланцет захищений – це одноразовий стерильний автоматичний скарифікатор (скарифікатор-автомат). Конструкція, яку мають захищені ланцети для взяття крові, виключає ймовірність випадкового контакту пацієнта з голкою як до, так і після його використання. Медична голка закрита захисним ковпачком, а після використання голка повертається в корпус ланцета. Наявність модифікацій одноразових ланцетів з різною глибиною проколу шкіри дозволяє підібрати ланцети в залежності від діагностичних завдань (табл.1).

Табл.1- Модифікації одноразових ланцетів з різною глибиною проколу шкіри

| Кольоровий код | Розмір голки | Глибина проколу | Застосування                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блакитний      | Голка 21G    | 1.8 мм          | Взяття крові з пальця у дорослих людей для визначення глюкози і проведення інших експрес-тестів;<br>Для проведення аналізів на гемоглобін, холестерин, гази крові, згортання крові та інших діагностичних тестів                                                                                       |
| Сірий          | Голка 23G    | 1.8 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Жовтий         | Голка 26G    | 1.8 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Фіолетовий     | Голка 28G    | 1.8 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Синій          | Голка 30G    | 1.5 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Світло-синій   | Голка 30G    | 1.8 мм          | Взяття крові з пальця у дорослих людей для визначення глюкози і проведення інших експрес-тестів (для проколу грубої шкіри дорослих людей);<br>Для проведення аналізів на гемоглобін, холестерин, гази крові, згортання крові та інших діагностичних тестів (для проколу грубої шкіри у дорослих людей) |
| Помаранчевий   | Голка 21G    | 2.2 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Червоний       | Голка 21G    | 2.4 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Світло-жовтий  | Голка 26G    | 2.2 мм          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики, скручуючим рухом за годинниковою стрілкою виверніть кольоровий захисний ковпачок з корпусу ланцета (див. Мал.1). **УВАГА!** Не використовуйте ланцет, якщо на корпусі відсутній, не закріплений або пошкоджений захисний ковпачок.
2. Виберіть місце на кінчику пальця пацієнта для забору капілярної крові та продезінфікуйте його спиртовою серветкою. Для отримання максимального обсягу крові і зменшення больових відчуттів необхідно здійснювати прокол трохи змістившись від центру подушечки пальця (рекомендується бокова поверхня подушечки безіменного пальця).

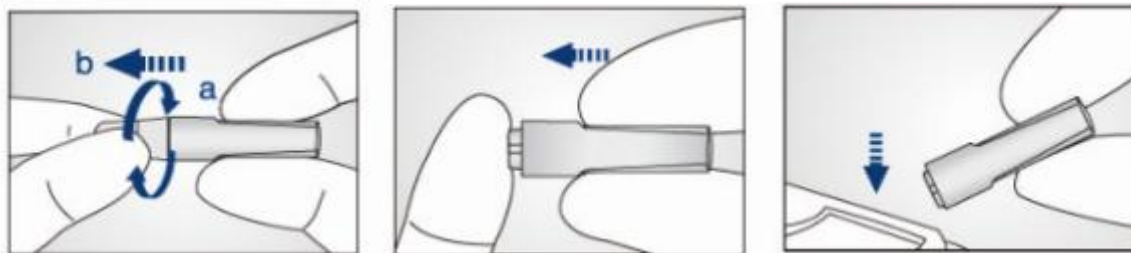

Мал.1

3. Притиснувши ланцет до поверхні шкіри і міцно утримуючи його строго перпендикулярно передбачуваного місця проколу, натисніть їм на палець.
4. Помістіть використаний одноразовий ланцет в призначений для цього контейнер для подальшої утилізації відповідно до вимог чинного законодавства.
5. М'якими масажними рухами вздовж пальця від основи в напрямку місця проколу отримайте необхідний обсяг крові.

### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою радіаційної стерилізації (R). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

100 шт. в упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Маркування** «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

**Виробник:** SteriLance Medical (Suzhou) Inc.  
No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China  
Tel.: +86 512 65799308, [www.sterilance.com](http://www.sterilance.com)

**Виробник:** Стеріленс Медікл (Сучжоу) Інк.  
№ 168 Путошань Роуд, Нью Дістріт, 215153 Сучжоу, Цзянсу, Н.Р. Китай  
Тел.: +86 512 65799308, [www.sterilance.com](http://www.sterilance.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

