

Інструкція із застосування медичного виробу

Подовжувачі для інфузійних магістралей

Вміст пакування: Подовжувач для інфузійних магістралей, довжина 1500 мм стерильний одноразового використання.

Призначення: для застосування в інфузійній терапії.

Характеристики: Виготовлений з полівінілхлориду, довжина 1500 мм. Складається з трубки та двох конекторів типу "Луер Лок". Трубка прозора для візуалізації потоку, стійка до перегину. Зовнішній діаметр 2,5 мм, внутрішній діаметр 1,2 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити подовжувач з упаковки.
3. Під'єднати подовжувач до системи для вливання інфузійних розчинів (або до шприца у шприцевому насосі).
4. Відкрити регулятор потоку (або включити шприцевий насос) та видалити повітря з подовжувача.
5. Під'єднати подовжувач до внутрішньовенного катетеру пацієнта.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Tel.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

