

Інструкція із застосування медичного виробу

Серветки медичні із нетканого матеріалу, просочені спиртовим розчином

№	Модифікація та розмір виробу
1	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 30x60мм, одноразового використання
2	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 30x65мм, одноразового використання
3	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 56x65мм, одноразового використання
4	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 60x100мм, одноразового використання
5	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 110x125мм, одноразового використання
6	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 135x185мм, одноразового використання
7	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 110x150мм, одноразового використання
8	Серветка, із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропиловим спиртовим розчином, розмір 120x150мм, одноразового використання

Призначення: призначені для зовнішнього місцевого застосування в якості антисептичного засобу, для дезінфекції рук, обробки шкіри до і після ін'єкцій, перед проведенням різних маніпуляцій, або інших поверхонь, які потребують дезінфекції.

Характеристики: серветки виготовлені з нетканого матеріалу, рівномірно просочені 70% розчином ізопропилового спирту. Кожна серветка має індивідуальну герметичну паперово-фольгову упаковку. Розміри наведені у таблиці - Модифікація та розмір виробу.

Інструкція із застосування:

1. Дістати паперово-фольгову упаковку з серветкою.
2. Відкрити та дістати серветку.
3. Ретельно обробити руки, потрібну ділянку шкіри або іншу поверхню, яка потребує дезінфекції.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Увага!

1. Зберігати у чистому, сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці. Уникати нагрівання.
2. Використовувати на неушкодженій шкірі.
3. Не обробляти серветками слизові оболонки.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та після закінчення терміну зберігання.
6. Тільки для одноразового використання!

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Пакування по 100шт.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).



Лінія відриву

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікал Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Тел.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

