


## Інструкція із застосування медичного виробу

### Щіточка ендцервікальна

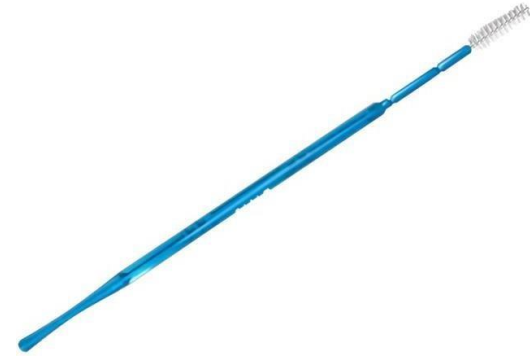

**Вміст пакування:** Щіточка ендцервікальна стерильна, одноразового використання.

**Призначення:** застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого забору матеріалу з цервікального каналу для наступного гістологічного дослідження.

**Характеристики:** Щіточка ендцервікальна, конічного типу, складається з ручки (матеріал ABS- пластик) і, власне, щітки (робочої голівки).

Матеріал щітки - нержавіюча сталь та поліамід. Довжина виробу - 18,5 см, довжина робочої голівки – 2 см

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити щіточку ендцервікальну з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Ввести щіточку в цервікальну зону таким чином, щоб було зручно взяти матеріали для дослідження.
4. Зробити декілька повних обертів щіточкою в обох напрямках, завдяки чому буде можливим взяти матеріал для дослідження.
5. Перенести отримані матеріали на лабораторне скло. Або, при необхідності надіслати матеріал в лабораторію, відламати кінець щітки по лінії зламу і помістити його в транспортну пробірку.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Маркування** «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.  
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Тел.: +86 518 85476682, Факс.: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД  
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,  
Піпелз Републік Китай

Тел.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

