



Інструкція із застосування медичного виробу

Скарифікатор сталевий

Призначення: використовується для проколу шкіри (найчастіше, пальця) при заборі капілярної крові на аналіз.

Характеристики: Скарифікатор сталевий- це одноразовий стерильний виріб. Він являє собою металеву пластину з центральним гострим зубцем у вигляді списа з однієї сторони.

Матеріал: сталь

Довжина списа $3.2 \text{ мм} \pm 0.6 \text{ мм}$

Довжина скарифікатора $40 \text{ мм} \pm 2 \text{ мм}$

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку та вилучити Скарифікатор з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
2. Виберіть місце на кінчику пальця пацієнта для забору капілярної крові та продезінфікуйте його спиртовою серветкою. Для отримання максимального обсягу крові та зменшення больових відчуттів необхідно здійснювати прокол трохи змістившись від центру подушечки пальця (рекомендується бокова поверхня подушечки безіменного пальця).
3. Наставте кінчик голки списа на місце проколу, різким рухом здійсніть прокол м'яких тканин та виведіть спис.
4. Помістіть використаний одноразовий ланцет в призначений для цього контейнер для подальшої утилізації відповідно до вимог чинного законодавства.
5. М'якими масажними рухами вздовж пальця від основи в напрямку місця проколу отримайте необхідний обсяг крові.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Не використовувати, після закінчення терміну придатності.
5. Тримати виріб у недоступному для дітей місці.
6. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою радіаційної стерилізації (R).

Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

200 шт. в упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China
Tel.: +86 512 65799308, www.sterilance.com

Виробник: Стеріленс Медікл (Сучжоу) Інк.
№ 168 Путошань Роуд, Нью Дістріт, 215153 Сучжоу, Цзянсу, Н.Р. Китай
Тел.: +86 512 65799308, www.sterilance.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

