

Інструкція із застосування медичного виробу

Зонд урогенітальний



Вміст пакування: Зонд урогенітальний стерильний, одноразового використання.

Призначення: для взяття біологічного матеріалу з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу і уретри, дозволяє провести цитологічний і бактеріологічний аналіз, може бути використаний при конізації шийки матки. Зонд дозволяє проводити забір матеріалу при вузькому або стенозованому цервікальному каналі.

Характеристики: Зонд урогенітальний виготовлений з поліпропілену. Складається з головки (робоча частина),

виготовленої з матеріалу дакрон і ручки (матеріал- поліпропілен). На ручці зонда є поперечна насічка, яка дозволяє при необхідності відламати кінець з робочою частиною і мазком та покласти її в пробірку/мікропробірку або контейнер для транспортування в лабораторію.

Розміри зонду урогенітального:

Довжина зонда (робоча частина + ручка): 175 ± 3 мм Діаметр робочої частини (з ворсовим покриттям): 3 мм

Довжина робочої частини (з ворсовим покриттям): 22 ± 2 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити зонд з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Занурити зонд в уретру або цервікальний канал.
4. Повільно повернути зонд в обидві сторони.
5. Вийняти зонд і перенести матеріал з ворсисті поверхні зонда на предметне скло або, при необхідності направити матеріал в лабораторію, відламати кінець зонда і помістити його робочу частину в транспортну пробірку або в контейнер.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати зонд відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. В індивідуальній упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,

Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua