

Інструкція із застосування медичного виробу

Джгут венозний

Призначення: для проведення внутрішньовенних маніпуляцій.

Характеристики: Джгут складається з м'якої пружної гумовотканинної стрічки з наконечником і засувкою та пластикового корпусу, що при маніпуляціях замикає стрічку в петлю та попереджає вислизання стрічки при регулюванні окружності петлі. Під час накладення та зняття джгутом легко користуватися однією рукою.

Довжина стрічки у вільному стані 40,0 см $\pm$ 1,0 см.

Ширина стрічки 2,5 см $\pm$ 0,1 см.

Джгут призначений для багаторазового використання, допускає прання за допомогою миючих засобів та обробку будь-якими дозволеними дезінфікуючими засобами.

Інструкція із застосування:

1. Обернути джгут навколо кінцівки, уникаючи перекручування стрічки.
2. Вставити засувку в корпус джгута.
3. Потягнути за вільний кінець джгута із зусиллям для обмеження циркуляції крові. Пульс на периферичних артеріях повинен зберігатися!
4. Здійснити внутрішньовенну маніпуляцію.
5. Для звільнення стрічки після проведення маніпуляцій натиснути на кнопку, розташовану на пластиковому корпусі джгута і звільнити засувку, даючи можливість джгуту розтібнутися.
6. Після використання продезінфікувати виріб відповідно до правил.

Увага!

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування. Зберігати у захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Використовувати на неушкодженій шкірі.
4. Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну зберігання.

Виріб нестерильний. Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

