

Інструкція із застосування медичного виробу

Ендотрахеальні трубки стерильні одноразового використання

№ п/п	Модифікація та розмір виробу
1	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 3,0 стерильна, одноразового використання
2	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 3,5 стерильна, одноразового використання
3	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 4,0 стерильна, одноразового використання
4	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 4,5 стерильна, одноразового використання
5	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 5,0 стерильна, одноразового використання
6	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 5,5 стерильна, одноразового використання
7	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 6,0 стерильна, одноразового використання
8	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 6,5 стерильна, одноразового використання
9	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 7,0 стерильна, одноразового використання
10	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 7,5 стерильна, одноразового використання
11	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 8,0 стерильна, одноразового використання
12	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 8,5 стерильна, одноразового використання
13	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 9,0 стерильна, одноразового використання
14	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 9,5 стерильна, одноразового використання
15	Ендотрахеальна трубка з манжетою розмір 10,0 стерильна, одноразового використання
16	Ендотрахеальна трубка розмір 2,5 стерильна, одноразового використання
17	Ендотрахеальна трубка розмір 3,0 стерильна, одноразового використання
18	Ендотрахеальна трубка розмір 3,5 стерильна, одноразового використання
19	Ендотрахеальна трубка розмір 4,0 стерильна, одноразового використання

Призначення: використовуються для оральної або назальної інтубації.

Характеристики: Ендотрахеальна трубка виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду, не містить латекс. Має конектор 15мм з «вушками» для фіксації, атравматичний дистальний кінець з отвором по Мерфі. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині трубки. Чітка шкала глибини інтубації з інтервалом 1 см. Ендотрахеальна трубка з манжетою має манжету циліндричної форми, великого об'єму низького тиску, а також пілотний балон для роздування манжети повітрям.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити трубку з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Ендотрахеальну трубку необхідно вводити в трахею за допомогою ларингоскопу або фібробронхоскопу через розкриту голосову щілину.
4. Для трубок з манжетою - манжета має бути розташована у верхніх відділах трахеї. Через пілотний балон роздути манжету повітрям за допомогою шприца.
5. Зафіксувати ендотрахеальну трубку в потрібному положенні. Під'єднати трубку до апарату ШВЛ, мішка Амбу.
6. Після завершення інтубації спочатку видалити повітря з манжети через пілотний балон за допомогою шприца (для трубок з манжетою).
7. Обережно видалити трубку і утилізувати відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

