

Інструкція із застосування медичного виробу

Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий

№ п/п	Модифікація та розмір виробу
1	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 6, стерильний, одноразового використання
2	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 8, стерильний, одноразового використання
3	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 10, стерильний, одноразового використання
4	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 12, стерильний, одноразового використання
5	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 14, стерильний, одноразового використання
6	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 16, стерильний, одноразового використання
7	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 18, стерильний, одноразового використання
8	Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий, розмір 20, стерильний, одноразового використання

Призначення: використовується для катетеризації сечового міхура у чоловіків. **Характеристики:** катетер урологічний типу Нелатона чоловічий виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду (PVC), складається з трубки та дренажної воронки (конектора, адаптера). Має гладку поверхню та закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці - два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 40 см. Універсальний конектор з кольоровим кодуванням розміру.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити катетер з упаковки. Перед використанням обробити катетер мастилом на водній основі, а отвір сечовивідного каналу – розчином фурациліну.
3. Опустити вільний кінець катетера в ємність для збору сечі або під'єднати до сечоприймача.
4. Плавню ввести заокруглений кінець катетера в отвір сечовивідного каналу до появи сечі. Поява сечі є ознакою того, що катетер знаходиться в сечовому міхурі.
5. Після закінчення виведення сечі видалити катетер з сечовивідного каналу.
6. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Матеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Дapu Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua