

Інструкція із застосування медичного виробу

Ложка (шпатель) Фолькмана



Вміст пакування: Ложка Фолькмана стерильна, одноразового використання.

Призначення: застосовується в гінекологічній та урологічній практиці для взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження з поверхні слизової піхви, шийки матки, з цервікального каналу та уретри.

Характеристики: Ложка (шпатель) Фолькмана складається з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді ложок

різного розміру та форми. Виготовлена з білого ABS-пластику. Поверхня інструменту швидко набуває температури тіла, виключаючи дискомфорт при проведенні процедури.

Довжина виробу 210 ± 3 мм.

Довжина робочої частини: 8 мм (з двох сторін).

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити ложку Фолькмана з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Легким рухом зібрати матеріал з поверхні слизової робочою частиною інструменту.
4. Перенести отримані матеріали на лабораторне скло легким лінійним рухом уздовж скла або, за необхідності, перенести матеріал в живильне середовище.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua