

Інструкція із застосування медичного виробу

Проктоскоп



Вміст пакування: Проктоскоп, розмір 22, стерильний, одноразового використання.

Призначення: призначений для забезпечення доступу до прямої кишки, огляду та проведення лікувальних маніпуляцій лікарем-проктологом.

Область застосування: проктологія.

Характеристики: виготовлений з прозорого, міцного, теплопровідного медичного полістиролу. Комплектується обтуратором для комфортного введення. Має заокруглений проксимальний накінецьник, що усуває дискомфорт при введенні. Оснащений зручним кріпленням для джерела світла. Висока прозорість туби забезпечує яскраве дистальне кільцеве освітлення. Висока якість матеріалу і обробки інструменту (гладка поверхня і краї) забезпечують його комфортну експлуатацію.

Розміри виробу:

- Зовнішній діаметр 22 мм;
- Внутрішній діаметр 17 мм;
- Робоча довжина 80 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити проктоскоп з упаковки. Не використовувати, якщо упаковку або проктоскоп пошкоджено!
3. Перед введенням проктоскопа, за необхідності, підключити джерело світла за допомогою кріплення синього кольору, розташованого в ручці пристрою.
4. Ззовні обробити проктоскоп мастилом, а потім поступово і обережно вставити проктоскоп в анальний отвір і пряму кишку пацієнта.
5. Коли проктоскоп буде знаходитись в необхідному положенні, вийняти внутрішній обтуратор і починати обстеження.
6. Якщо потрібно повернути або переставити проктоскоп, слід знову встановити обтуратор.
7. Після закінчення обстеження поступово і обережно вийняти проктоскоп з анального каналу.
8. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Використати одразу після відкриття упаковки.
4. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на

упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

