

Інструкція із застосування медичного виробу

Утримувач голки

Призначення: Призначений для трикомпонентної вакуумної системи забору крові та є обов'язковим компонентом для фіксації вакуумної пробірки та двосторонньої голки при взятті крові у пацієнта. Забезпечує жорстку фіксацію голки та є напрямним для пробірки в момент взяття крові.

Характеристики: Утримувач не взаємодіє з кров'ю пацієнта та виготовлений із прозорого пластику. Оснащений центральним різьбленням для надійної фіксації голки під час проведення процедури взяття крові.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити пакування.
2. З голки зняти захисний ковпачок білого кольору із клапанної частини двосторонньої голки. Вставити голку в утримувач, вкрутити за годинниковою стрілкою до упору.
3. Зняти кольоровий захисний ковпачок із голки та ввести голку у вену з дотриманням правил асептики.
4. Утримуючи систему, яка складається з утримувача та голки, з нижньої сторони вставити вакуумну пробірку до упору пробивши гумовий ковпачок пробірки голкою.
5. Витягнути пробірку з утримувача та взяти наступну за потреби.
6. Після забору крові витягти голку з вени з дотриманням правил асептики.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування. Зберігати у захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Тільки для одноразового використання.
4. Після одноразового використання знищуйте відповідно до правил.

Правила зберігання:

Зберігання виробів проводиться в пакуванні підприємства-виробника в сухому прохолодному приміщенні.

Термін придатності- необмежений.

Виріб нестерильний.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метерієлс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua

