

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Аплікатор цервікальний (тип Комбі)



**Вміст пакування:** Аплікатор цервікальний (тип Комбі) стерильний, одноразового використання.



**Призначення:** застосовується в гінекологічній практиці для одномоментного забору матеріалу (епітелію) з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки (ектоцервіксу) та цервікального каналу (ендоцервіксу) з метою проведення цитологічних досліджень.

**Характеристики:** Складається з двох частин: порожнистої ручки з поліпропілену (матеріал PP) і

робочої частини - гнучкої рамки у вигляді ромба. Матеріал робочої частини - поліамід (РА). Довжина зонда 175 мм. Довжина робочої частини 37 мм.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити аплікатор цервікальний (тип Комбі) з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Забезпечити доступ до шийки матки за допомогою дзеркала гінекологічного JS.
4. Для якісного забору матеріалу глибоко ввести в цервікальний канал центральну (виступаючу) частину робочої зони Аплікатора цервікального (тип Комбі). Докладіть невелике зусилля таким чином, щоб ворс аплікатора щільно контактував із зовнішньою і внутрішньою поверхнею шийки матки.

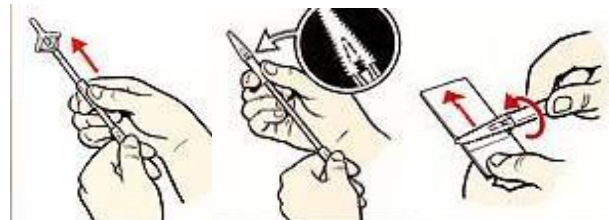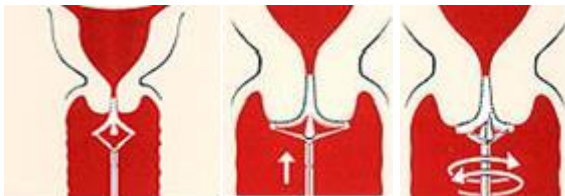

5. Зробити декілька повних обертів аплікатором в обох напрямках, завдяки чому буде можливим взяти матеріал для дослідження.
6. Витягніть зонд, перемістіть втулку так, щоб поверхня, яка контактувала зі слизовою, випросталася в положення, придатне для нанесення матеріалу на предметне скло.
7. Перенести отримані матеріали на лабораторне скло. Або перенести матеріал в маркований даними пацієнта контейнер з рідким консервантом, який направляється у лабораторію для досліджень.
8. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.  
**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.  
Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.  
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,  
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

