

Інструкція із застосування медичного виробу

Аплікатори з віскозною кінцівкою, у транспортній пробірці

№ п/п	Перелік виробів
1	Аплікатор з віскозною кінцівкою, у транспортній пробірці, дерев'яний стрижень стерильний, одноразового використання
2	Аплікатор з віскозною кінцівкою, у транспортній пробірці, пластиковий стрижень стерильний, одноразового використання
3	Аплікатор з віскозною кінцівкою, у транспортній пробірці, металевий стрижень стерильний, одноразового використання

Призначення: Аплікатор з віскозною кінцівкою у транспортній пробірці призначений для взяття і транспортування зразків біологічного матеріалу в медичні установи для проведення лабораторних досліджень; взяття санітарних змивів; засівання матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища та ін.

Характеристики: до складу виробу входять: круглодонна пластикова пробірка (12x150мм), аплікатор з віскозною кінцівкою, вмонтований в пробку. Аплікатор являє собою гігроскопічний віскозний тампон, який виготовлено шляхом намотування волокна за спеціальною технологією, що надає йому краплеподібну форму, зафіксований на дерев'яному, пластиковому або металевому стрижні. Розміри аплікатора: 150мм × Ø 2.2мм, діаметр тампона 5мм ± 0.5мм. На етикетці на поверхні пробірки передбачено місце для нанесення персональних даних.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити аплікатор з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Тримавши аплікатор за край стрижня з пробкою, провести необхідні маніпуляції (відбір необхідної кількості біоматеріалу).
4. Обережно помістити аплікатор в пробірку, не торкаючись її стінок.
5. Направити матеріал в медичну установу за призначенням.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою радіаційної стерилізації (R). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікал Матеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай
Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua



