

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Катетер урологічний типу Фолея 2-х ходовий

#### Специфікація:

Розмір	Колір	Довжина, мм	Об'єм балона, мл.	Внутр. діам. I.D., мм.	Зовн. діам. O.D., мм.
CH/FR6	світло-червоний	270	3	2,3	3,3
CH/FR8	чорний	270	3-5	2,3	3,3
CH/FR10	сірий	270	3-5	2,3	3,3
CH/FR12	бежевий	400	10	2,8	4,0
CH/FR14	зелений	400	10	3,3	4,7
CH/FR16	помаранчевий	400	10	3,8	5,3
CH/FR18	червоний	400	30	4,5	6,0
CH/FR20	жовтий	400	30	5,1	6,7
CH/FR22	фіолетовий	400	30	5,6	7,3
CH/FR24	синій	400	30	6,2	8,0
CH/FR26	рожевий	400	30	6,9	8,7

**Призначення:** використовується для довгострокової катетеризації сечового міхура та проведення лікувальних маніпуляцій.

**Характеристики:** катетер урологічний типу Фолея 2-х ходовий виготовлений з латексу та покритий силіконом. Має 2 ходи, складається з трубки, дренажної воронки (конектора, адаптера) та воронки роздування балону (з кольоровим клапаном). Катетери розміром 6-10 забезпечені також провідником для полегшення маніпуляцій. Балон, об'ємом від 3мл до 30мл (в залежності від розміру катетера), є симетричним та безпечним. Катетер має гладку поверхню та закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці - два бічні симетричні отвори з гладкими краями для ефективного дренажу. Універсальний конектор. Кольорове кодування розміру.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити катетер з упаковки. Перед використанням обробити катетер мастилом на водній основі, а отвір сечовивідного каналу - розчином фурациліну.
3. Опустити вільний кінець катетеру в ємність для збору сечі або під'єднати до сечоприймача через дренажну воронку.
4. Плавню ввести заокруглений кінець катетеру в отвір сечовивідного каналу до появи сечі. Поява сечі є ознакою того, що катетер знаходиться в сечовому міхурі.
5. Через хід з кольоровим клапаном за допомогою шприця роздути фіксуючий балон дистильованою водою або фізіологічним розчином.
6. Після закінчення виведення сечі через другий хід (дренажну воронку), за необхідності видалення катетеру, спочатку необхідно видалити воду або розчин з балону. Далі видалити катетер з сечовивідного каналу.
7. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

### **Застереження:**

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Містить натуральний латекс, що може стати причиною алергічних реакцій.
4. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
5. Використати одразу після відкриття упаковки.
6. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (EO). Апірогенний та нетоксичний.  
**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.  
Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033

[www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метіріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція, Піпелз Републік Китай

Тел.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033

[www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

