

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття


| № п/п | Модифікація та розмір виробу                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 6, стерильний, одноразового використання  |
| 2     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 8, стерильний, одноразового використання  |
| 3     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 10, стерильний, одноразового використання |
| 4     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 12, стерильний, одноразового використання |
| 5     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 14, стерильний, одноразового використання |
| 6     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 16, стерильний, одноразового використання |
| 7     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 18, стерильний, одноразового використання |
| 8     | Катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття, розмір 20, стерильний, одноразового використання |

**Призначення:** використовується для катетеризації сечового міхура.

**Характеристики:** катетер урологічний типу Нелатона чоловічий Гідрофільне покриття виготовлений з медичного імплантацийно-нетоксичного полівінілхлориду (PVC), має незмивне гідрофільне покриття, інтегроване в матеріал катетера. Складається з трубки та дренажної воронки (конектора, адаптера). Має гладку поверхню та закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці - два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 40 см. Універсальний конектор з кольоровим кодуванням розміру. На зовнішньому боці пакування має клейке кріплення (до штативу або іншої гладкої поверхні) для підготовки до використання.

#### Інструкція із застосування:

- З дотриманням правил асептики відкрити упаковку з боку, де розміщене клейке кріплення.
- Не вилучаючи катетер з упаковки, вертикально закріпити упаковку з катетером на штативі або іншій сухій гладкій поверхні за допомогою клейкого кріплення.

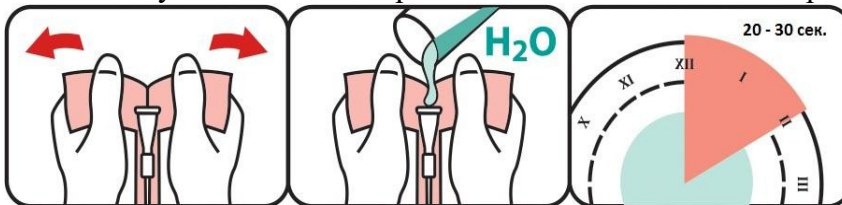

- Для активації гідрофільного покриття і надання катетеру слизькості, заповнити упаковку з катетером розчином фурациліну, фізіологічним розчином або водою на 20-30сек.
- Перед використанням катетеру обробити отвір сечовивідного каналу розчином фурациліну.
- Вилучити катетер з упаковки.
- Опустити вільний кінець катетеру в ємність для збору сечі або під'єднати до сечоприймача.
- Плавню ввести заокруглений кінець катетеру в отвір сечовивідного каналу до появи сечі. Поява сечі є ознакою того, що катетер знаходиться в сечовому міхурі.
- Після закінчення виведення сечі видалити катетер з сечовивідного каналу.

9. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

**Застереження:**

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Матеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,

Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

