

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Презервативи з натурального латексу для ультразвукового дослідження

**Призначення:** Для проведення ректальних та вагінальних ультразвукових досліджень. Використовується для утворення захисного гігієнічного бар'єру від забруднення для всіх моделей датчиків ультразвукових апаратів. А також захищає пацієнта від заражень.

**Характеристики:** Презервативи виготовлені з натурального латексного каучуку без використання лубриканту. Без накопичувача, для більш щільного прилягання до датчика УЗД апарату. Гладкі, прозорі, циліндричної форми. Легко надягаються на датчик, не зісковзують та не утворюють складок під час дослідження.

**Інструкція із застосування:**

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити презерватив з упаковки.
3. Одягнути на датчик апарату ультразвукового дослідження.
4. Після використання, утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

**Застереження:**

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!
6. Цей продукт містить латекс натурального каучуку, який може спричинити алергічні реакції, у тому числі анафілактичний шок.

**Протипоказання:** Індивідуальна непереносність компонентів (латексу).

**Умови зберігання:** Зберігати в упакованому вигляді у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.

**Фізичні властивості відповідають ISO4074:2015**

Стерилізовано. R- стерилізація.

Апірогенно. Нетоксичне.

**Термін придатності** - 5 років від дати виробництва.

Індивідуальна упаковка.

від Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong  
No.5 Tongyi Road, Lingbei Industrial Zone, Suixi, 524338,  
Zhanjiang, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Tel.: +86-139-24408267, [www.fitonegroup.com](http://www.fitonegroup.com)

**Виробник:** Фітон Латекс Продактс Ко., ЛТД Гуандун  
№5 Туньї Роуд, Лінбей Індастріал Зон, Суйсі, 524338,  
Чжаньцзян, Гуандун, Піпелз Републік Китай  
Тел.: +86-139-24408267, [www.fitonegroup.com](http://www.fitonegroup.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
Тел.: +38-094-9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)  
Івана та Юрія Лип, 13 м. Одеса, вул.

