


Інструкція із застосування медичного виробу

Шпатель отоларингологічний пластиковий

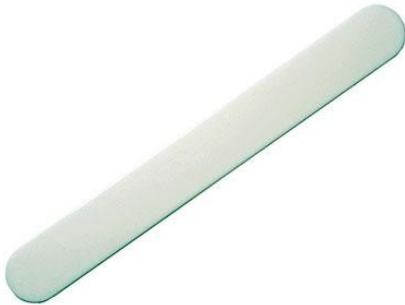

Вміст пакування: Шпатель отоларингологічний пластиковий стерильний, одноразового використання.

Призначення: багатофункціональний медичний інструмент, найчастіше застосовується для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.

З інших сфер застосування найбільш відоме використання шпателя отоларингологічного для нанесення мазей, кремів і бальзамів, перемішування рідин або порошків тощо.

Область застосування: отоларингологія, терапевтична практика, косметологія тощо.

Характеристики: Шпатель виготовлений з прозорого пластику. Прозорий матеріал шпателя дозволяє візуалізувати клінічну картину при натисканні на патологічно змінену область під час огляду. Висока якість матеріалу і обробки інструменту (гладка поверхня і краї) забезпечують його комфортну експлуатацію. Виріб має рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.

Розміри виробу: довжина - 150 мм; ширина - 19 мм; товщина - 2,0 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити шпатель отоларингологічний пластиковий з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. За допомогою шпателя при відкритому роті, по черзі відводячи праву і ліву щоки під час ларингологічного обстеження, провести огляд ротової порожнини пацієнта.
4. Для огляду ротоглотки шпатель кладуть на передні 2/3 язика, притискують його донизу і дещо на себе.
5. За необхідності, за допомогою шпателя можна зробити взяття зіскрібка зі слизової оболонки ротової порожнини.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua