

Інструкція із застосування медичного виробу

Шпатель цервікальний (Ейра)



Вміст пакування: Шпатель цервікальний стерильний, одноразового використання.

Призначення: застосовується в гінекологічній практиці для отримання ектоцервікальних мазків і мазків заднього склепіння, з поверхні слизової піхви, зіву цервікального каналу і уретри.

Характеристики: Шпатель цервікальний складається з рукоятки, на протилежних кінцях якої розміщені дві робочі частини у вигляді лопаток з перфорацією, різного розміру та форми. Виготовлений з білого поліпропілену. Поверхня інструменту швидко набуває температури тіла, виключаючи дискомфорт при проведенні процедури. Перфорація на робочих частинах шпателя дозволяє провести взяття оптимальної кількості матеріалу.

Довжина виробу 180 ± 3 мм.

Ширина робочих частин: 15 мм - з однієї сторони; 20 мм – з іншої сторони. Довжина робочих частин: 40 ± 2 мм - з однієї сторони; 20 мм – з іншої сторони.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити шпатель цервікальний з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Не докладаючи значного зусилля, легким рухом зібрати матеріал з поверхні слизової робочою частиною інструменту.
4. Перенести отримані матеріали на лабораторне скло або в живильне середовище.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індустріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua