

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Термопапір

№	Перелік виробів	Розмір	Особливість	Кількість знімків
1	Термопапір для відеопринтера SUPER ULSTAR-1100S	110 мм x 20 м	Стандартний	215
2	Термопапір для відеопринтера SUPER ULSTAR-1100HG	110 мм x 18 м	Високий глянець	193

**Призначення:** Використовується, як витратний матеріал для відеопринтерів термічного типу для друку та зберігання зображень, отриманих ультразвуковим діагностичним пристроєм в медичних умовах, таких як клініки та лікарні. Основними цільовими користувачами є медичні працівники, у тому числі радіологи та акушери, які обстежують пацієнтів та/або плід за допомогою УЗД. Зображення, надруковані на термопапері, призначені лише для записів пацієнтів та для рекомендацій фахівця і не призначені для використання в діагностичних цілях(!).

#### Сумісність:

Виріб	Сумісність		Принтер	
	Sony	Mitsubishi	Sony	Mitsubishi
SUPER ULSTAR-1100S	UPP-110S (Type I)		UP-898/ 897/ 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100HG	UPP-110HG (Type V)	K95H/K91HG/KP91HG	UP-898/ 897/ 895 Series	P95/ P93

#### Експлуатаційні характеристики:

Друк медичних зображень вимагає високої точності, доступної завдяки методу термодруку. Термопринтер використовує тепло для друку зображення на термопапері, який має спеціальне покриття, щоб зробити поверхню паперу чутливою до теплових імпульсів.

Термопапір є витратним матеріалом до медичного пристрою.

#### Використання термопаперу для друку на термопринтері:

- Перевірте, що ширина рулону термопаперу (110 мм) відповідає характеристикам вашого принтера.
- Розірвіть пластиковий пакет, щоб вийняти рулон термопаперу та зніміть наклейку, прикріплену до кінця рулону.
- Відкрийте лоток для завантаження паперу принтера та правильно завантажте рулон термопаперу у принтер. Зверніться до посібника з експлуатації принтера, оскільки кожна модель принтера відрізняється.
- Будьте обережні, щоб не згинати та не торкатися поверхні невикористаного термопаперу. Обов'язково витягніть та утилізуйте перші 15-20 см термопаперу. Ця перша частина могла зібрати пил або відбитки пальців, що може спричинити низьку якість друку та пошкодження принтера.
- Вставте лоток для завантаження паперу з термопапером на місце та увімкніть принтер.
- Перед друком установіть конфігурацію типу паперу на принтері відповідно до типу моделі продукту Durico. Наприклад, виберіть S для SUPER ULSTAR-1100S або виберіть HG для SUPER ULSTAR-1100HG. Інструкції щодо налаштування типу паперу відрізняються залежно від марки та моделі принтера, тому, за потребою, зверніться до посібника з експлуатації принтера, щоб отримати докладні вказівки.
- Відрегулюйте параметри контрастності та яскравості на вашому принтері для отримання оптимальних результатів друку. Інструкції щодо налаштування контрастності та яскравості відрізняються залежно від марки та моделі принтера, тому зверніться до посібника з експлуатації принтера, щоб отримати докладні вказівки.
- Більшість принтерів потребують регулярного обслуговування, включаючи очищення термоголовки та валика. Щоб отримати оптимальні результати друку, зверніться до посібника з експлуатації принтера щодо вказівок по обслуговуванню принтера.

#### Зберігання надрукованих документів:

- Зберігайте папір у темному, прохолодному та сухому місці. Під впливом тепла, вологи або сонячного світла надруковане зображення може збліднути, змінити колір або потемніти.
- Не наносьте на поверхню надрукованого паперу:
  - Пластикові стрічки
  - Пластикові гумки
  - Копіювальний тонер

Вініл  
Чорнило маркера  
Пластифікатор, такий як настільні килимки  
Летючі органічні розчинники  
Алкоголь

3. Не залишайте відбитки пальців на поверхні надрукованого паперу.
4. Не тріть надруковану поверхню.
5. Не ламінують надрукований папір. Ламінування може призвести до розмазування або затемнення надрукованого зображення.
6. Рекомендується зберігати кожен роздрукований аркуш лицьовою стороною догори в поліпропіленовому пакеті або складати аркуші термопаперу стопкою між аркушами.
7. Призначено лише для одноразового використання. Не використовуйте надрукований папір повторно.

#### **Утилізація продукту:**

Не підлягає переробленню. Утилізуйте термопапір відповідно до вимог чинного законодавства. Не спалюйте, оскільки цей продукт покритий хімічними речовинами на пластиковій плівці.

#### **Застереження:**

1. Призначено лише для використання в термопринтерах.
2. Не є медичним приладом. Призначено для використання з медичним пристроєм.
3. Для одноразового використання. Не використовуйте повторно жодну частину цього продукту після друку.
4. Не використовуйте цей виріб, якщо поліетиленовий пакет розірваний або невикористаний папір почорнів.
5. Завжди обережно поведіться з рулоном паперу, коли завантажуєте/вивантажуєте його в/з принтера, щоб уникнути попадання на папір пилу, бруду, відбитків пальців тощо.

#### **Зберігання недрукованого паперу:**

1. Зберігати невикористаний папір у прохолодному, сухому та темному місці (не вище 30 °C).
2. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.
3. Уникати використання летючих органічних розчинників або вінілхлориду.
4. Не торкайтесь пальцями поверхні невикористаного термопаперу, оскільки відбитки пальців можуть пошкодити принтер.

**Термін придатності** - при кімнатній температурі не вище 30 °C та відносної вологості повітря не вище 80% - 3 роки від дати, вказаної на упаковці.

Пакування по 5 шт. В індивідуальній упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

#### **Виробник: DURICO C&T, INC**

33, Oedar 6-gil, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 37240, Republic of Korea  
Tel.: +82 2 525 8405, [www.durico.co.kr](http://www.durico.co.kr)

#### **Виробник: ДУРІКО С&Т, ІНК**

33, Оедап 6-гіл, Санджу, Кьонсан-Пукто 37240, Республіка Корея  
Тел.: +82 2 525 8405, [www.durico.co.kr](http://www.durico.co.kr)

#### **Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

