

Інструкція із застосування медичного виробу

Воронка вушна



№ п/п	Розмір виробу
1	Воронка вушна стерильна, отвір Ø 2,5 мм
2	Воронка вушна стерильна, отвір Ø 4 мм
3	Воронка вушна стерильна, отвір Ø 4,6 мм

Призначення: воронка вушна призначена для огляду слухового проходу і барабанної перетинки.

Область застосування: отоларингологія.

Характеристики: воронка вушна виготовлена з поліетилену. Висока якість матеріалу і обробки інструменту (гладка поверхня і краї) забезпечують його комфортну експлуатацію. Довжина виробу 35мм, діаметр отвору наведений у таблиці «Розмір виробу».

Інструкція із застосування:

1. Огляд глибинних частин слухового проходу проводять за допомогою лобного рефлектора.
2. Обрати воронку вушну необхідного розміру. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
3. Вилучити воронку вушну з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
4. Ввести воронку в слуховий прохід для огляду його глибинних частин та барабанної перетинки, утримуючи виріб великим, вказівним і середнім пальцями руки за обідок.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суян Медікл Метеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua



