

Інструкція із застосування медичного виробу

Зонд-тампон

Вміст пакування: Зонд-тампон стерильний, одноразового використання.

Призначення: використовується як інструмент для підготовки лабораторного поля для забору зразка матеріалу (з шийки матки, цервікального каналу) в гінекологічній практиці для бактеріологічного, вірусологічного та цитологічного досліджень.

Характеристики: Зонд-тампон виготовлений з поліпропілену. Складається з головки (робоча частина), виготовленої з поролонової губки і ручки (матеріал- поліпропілен).

Довжина зонда (робоча частина+ ручка): 188 ±3 мм

Довжина робочої частини (з ворсовим покриттям): 20 ±2 мм

Діаметр робочої частини (з ворсовим покриттям): 9 мм

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити зонд з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Зонд-тампон поролоновою частиною (торцем) щільно притискається (НЕ вводити в цервікальний канал (!)) до шийки матки. Круговим обертанням близько 4-5 оборотів слизова пробка «намотується» на поролонову частину.
4. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати зонд відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності- 5 років від дати, вказаної на упаковці.

В індивідуальній упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86-518-85476682, Fax.: +86-518-85466033

www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Матерієлс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86-518-85476682, Fax.: +86-518-85466033

www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38-094-9547340, www.jsukraine.com.ua

