

Інструкція із застосування медичного виробу

Джгут венозний

Призначення: для проведення внутрішньовенних маніпуляцій.

Характеристики: Джгут складається з м'якої пружної гумовотканинної стрічки з наконечником і засувкою та пластикового корпусу, що при маніпуляціях замикає стрічку в петлю та попереджає вислизання стрічки при регулюванні окружності петлі. Під час накладення та зняття джгутом легко користуватися однією рукою.

Довжина стрічки у вільному стані 40,0 см ± 1,0 см.

Ширина стрічки 2,5 см ± 0,1 см.

Джгут призначений для багаторазового використання, допускає прання за допомогою миючих засобів та обробку будь-якими дозволеними дезінфікуючими засобами.

Інструкція із застосування:

1. Обернути джгут навколо кінцівки, уникаючи перекручування стрічки.
2. Вставити засувку в корпус джгута.
3. Потягнути за вільний кінець джгута із зусиллям для обмеження циркуляції крові. Пульс на периферичних артеріях повинен зберігатися!
4. Здійснити внутрішньовенну маніпуляцію.
5. Для звільнення стрічки після проведення маніпуляцій натиснути на кнопку, розташовану на пластиковому корпусі джгута і звільнити засувку, даючи можливість джгута розстібнутися.
6. Після використання продезінфікувати виріб відповідно до правил.

Увага!

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування. Зберігати у захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Використовувати на неушкодженій шкірі.
4. Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну зберігання.

Виріб нестерильний. Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.



Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.
tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua