

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Катетер урологічний типу Нелатона жіночий

№ п/п	Модифікація та розмір виробу
1	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 6, стерильний, одноразового використання
2	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 8, стерильний, одноразового використання
3	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 10, стерильний, одноразового використання
4	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 12, стерильний, одноразового використання
5	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 14, стерильний, одноразового використання
6	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 16, стерильний, одноразового використання
7	Катетер урологічний типу Нелатона жіночий, розмір 18, стерильний, одноразового використання

**Призначення:** використовується для катетеризації сечового міхура у жінок.

**Характеристики:** катетер урологічний типу Нелатона жіночий виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду (PVC), складається з трубки та дренажної воронки (конектора, адаптера). Має гладку поверхню та закритий атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці - два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 20 см. Універсальний конектор з кольоровим кодуванням розміру.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити катетер з упаковки. Перед використанням обробити катетер мастилом на водній основі, а отвір сечовивідного каналу – розчином фурациліну.
3. Опустити вільний кінець катетеру в ємність для збору сечі або під'єднати до сечоприймача.
4. Плавню ввести заокруглений кінець катетеру в отвір сечовивідного каналу до появи сечі. Поява сечі є ознакою того, що катетер знаходиться в сечовому міхурі.
5. Після закінчення виведення сечі видалити катетер з сечовивідного каналу.
6. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.  
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.  
tel: 86-518-85476682, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ “Джей Ес Україна”.  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
(048) 766-91-61; email: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net); [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)