

Інструкція із застосування медичного виробу

Пластир бактерицидний JS на еластичній тканинній основі

№	Модифікація та розмір виробу
1	Пластир бактерицидний JS на еластичній тканинній основі, розмір 1,9х7,2 см

Призначення: для закриття місць ін'єкцій, а також для надання першої медичної допомоги при подряпинах шкіри, невеликих ранах та порізах.

Характеристики: пластир нестерильний тілесного кольору, має м'яку абсорбуючу подушечку, розміщену в центрі основної смуги. Еластична тканинна основа.

Інструкція із застосування:

1. Перед використанням очистити та висушити поверхню місця накладення пластиру.
2. Розкривши безпосередньо перед використанням індивідуальну упаковку, зняти з пластиру захисне покриття.
3. Не торкаючись бинтового шару, накласти пластир абсорбуючою подушечкою до рани.
4. Притиснути клейкі краї до шкіри.

Увага!

1. Зберігати у чистому, сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.
2. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та після закінчення терміну зберігання.

Термін придатності - 3 роки від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.



Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.
tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua