

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Пластир медичний JS на бавовняній основі

№	Модифікація та розмір виробу
1	Пластир медичний JS на бавовняній основі, розмір 1x500 см
2	Пластир медичний JS на бавовняній основі, розмір 2x500 см
3	Пластир медичний JS на бавовняній основі, розмір 3x500 см
4	Пластир медичний JS на бавовняній основі, розмір 5x500 см

**Призначення:** широкого спектру використання, у тому числі, для фіксації хірургічних пов'язок, катетерів, та інших медичних матеріалів і пристосувань.

**Характеристики:** пластир котушковий повітропроникний, білого кольору. Пластир має оптимальну адгезію та легко знімається. Основа -100% бавовна з водонепроникною смолою.

#### Інструкція із застосування:

1. Перед використанням очистити та висушити поверхню місця накладення пластиру.
2. Безпосередньо перед використанням відрізати смужку необхідної довжини.
3. Прикласти пластир клейкою стороною до пов'язки.
4. Притиснути клейкі краї пластиру до поверхні місця накладення.

#### Увага!

1. Зберігати у чистому, сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.
2. Використовувати на неушкодженій шкірі.
3. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та після закінчення терміну зберігання.

**Термін придатності** - 3 роки від дати, вказаної на упаковці.  
Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.



**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.  
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.  
tel: 86-518-85476682, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ "Джей Ес Україна".  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
(048) 766-91-61; email: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net); [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)