

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Подовжувачі для інфузійних магістралей

**Вміст пакування:** Подовжувач для інфузійних магістралей, довжина 1500 мм стерильний одноразового використання.

**Призначення:** для застосування в інфузійній терапії.

**Характеристики:** Виготовлений з полівінілхлориду, довжина 1500 мм. Складається з трубки та двох конекторів типу "Луер Локк". Трубка прозора для візуалізації потоку, стійка до перегину. Зовнішній діаметр 2,5 мм, внутрішній діаметр 1,2 мм.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити подовжувач з упаковки.
3. Під'єднати подовжувач до системи для вливання інфузійних розчинів (або до шприца у шприцевому насосі).
4. Відкрити регулятор потоку (або включити шприцевий насос) та видалити повітря з подовжувача.
5. Під'єднати подовжувач до внутрішньовенного катетеру пацієнта.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.  
tel: 86-518-85476682, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ "Джей Ес Україна".

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
(048) 766-91-61; email: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net); [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

