

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Пробірки центрифужні з кришками та без кришок Мікропробірки типу Епендорф

**Вміст пакування:** Пробірки центрифужні з кришкою одноразового використання.

**Призначення:** Мікропробірки призначені для транспортування та зберігання хімічних речовин і біоматеріалів, використовуються в процесі відбору проб, вирощування клітинних культур з метою проведення лабораторних досліджень і аналізів.

**Характеристики:** Пробірки лабораторні становлять собою циліндричні або конічні ємності зі звужуваним дном обсягами від 0,2 до 15 мл., виготовлені з прозорого поліпропілену. Пробірки з кришками, інтегрованими з пробіркою на петлі (типу «Епендорф»), що щільно закриваються та без кришок. Можуть мати або не мати градування та спідницю стійкості.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити пакування.
2. Медичний виріб готовий до використання.
3. Мікропробірки виставляються в штатив.
4. За допомогою напівавтоматичної піпетки в них вноситься аналітичний матеріал та/або реакційна суміш.
5. Пробірки закриваються і поміщаються на зберігання, або в них проводиться реакція, або вони будуть розміщені в прилад для проведення вимірювання кількості досліджуваних аналізів.

#### Застереження:

1. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
2. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
3. Не використовувати, якщо змінився зовнішній вигляд виробу.
4. Тільки для одноразового використання.
5. Після одноразового використання знищуйте відповідно до правил.

#### Правила зберігання:

Зберігання виробів проводиться в упаковці підприємства-виробника в сухому прохолодному приміщенні.

**Термін придатності-** необмежений.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,LTD  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province,  
222002, People's Republic of China  
Tel.: 0086 (518) 85476682, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)



**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна».  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13  
(048) 766-91-61; email: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net); [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)