

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Рукавички медичні оглядові JS нестерильні

№ п/п	Модифікація та розмір виробу
1	Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені, розмір XS
2	Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені, розмір S
3	Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені, розмір M
4	Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені, розмір L
5	Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені, розмір XL

**Призначення:** рукавички медичні оглядові JS призначені для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях.

**Характеристики:** виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу, не містять латексу. Довжина рукавичок не менше 230мм. Нестерильні, не припудрені, текстурована поверхня пальців, мають валик на манжеті. Колір – фіолетовий.

Розмір виробу	Вага, г	Товщина долоні, мм	Товщина манжети, мм	Товщина пальця, мм
розмір XS	2.8± 0.2	0.07± 0.03	0.06± 0.03	0.10± 0.03
розмір S	2.8± 0.2	0.07± 0.03	0.06± 0.03	0.10± 0.03
розмір M	3.0± 0.2	0.07± 0.03	0.06± 0.03	0.10± 0.03
розмір L	3.5± 0.2	0.07± 0.03	0.06± 0.03	0.10± 0.03
розмір XL	4.0± 0.2	0.07± 0.03	0.06± 0.03	0.10± 0.03

#### Інструкція із застосування:

1. Перед використанням зняти з рук всі прикраси, вимити та висушити руки.
2. Дістати рукавички з коробки.
3. Перевірити цілісність рукавичок, не використовувати у разі пошкодження.
4. Одягти рукавички на руки, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій зняти рукавички та утилізувати відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Зберігати при температурі від 5 до 30°C.
3. Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну зберігання.
4. Тільки для одноразового використання!

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

50 пар (100 шт.) в упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500

[www.intcomedical.com](http://www.intcomedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ “Джей Ес Україна”.

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

(048) 766-91-61; email: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net); [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

