

Інструкція із застосування медичного виробу

Щіточка ендocerвікальна



Вміст пакування: Щіточка ендocerвікальна стерильна, одноразового використання.

Призначення: застосовується в гінекологічній практиці для отримання глибокого забору матеріалу з цервікального каналу для наступного гістологічного дослідження.

Характеристики: Щіточка ендocerвікальна, конічного типу, складається з ручки (матеріал ABS-пластик) і, власне, щітки (робочої голівки).

Матеріал щітки - нержавіюча сталь та поліамід.

Довжина виробу - 18,5 см, довжина робочої голівки – 2 см

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити щіточку ендocerвікальну з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Ввести щіточку в цервікальну зону таким чином, щоб було зручно взяти матеріали для дослідження.
4. Зробити декілька повних обертів щіточкою в обох напрямках, завдяки чому буде можливим взяти матеріал для дослідження.
5. Перенести отримані матеріали на лабораторне скло. Або, при необхідності надіслати матеріал в лабораторію, відламати кінець щітки по лінії зламу і помістити його в транспортну пробірку.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.
tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua