

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Шприц інсуліновий 1 мл 100 МО

**Вміст пакування:** Шприц інсуліновий 1 мл 100 МО стерильний одноразового використання.

**Призначення:** призначений для введення інсуліну.

**Характеристики:** шприц трьохкомпонентний, об'єм 1 мл (складові: прозорий циліндр, поршень з плунжером (матеріал – медичний поліпропілен) та ущільнювач (матеріал – гума)). Інтегрована (нез'ємна) голка з трьохгранною заточкою. Чітка, стійка до стирання шкала U-100. Стопорне кільце. Є захисні ковпачки для голки і плунжера для додаткового забезпечення стерильності. Розмір голки 0,3x13 мм.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити шприц з упаковки.
3. Зняти захисний ковпачок з плунжера, потім з голки, набрати необхідну кількість розчину для ін'єкції в шприц шляхом повільного виводу поршня.
4. Перед введенням лікарського засобу видалити повітря з циліндру шприца.
5. Після проведення ін'єкції одягти захисний ковпачок на голку.
6. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.

tel: 86-518-85476682, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ “Джей Ес Україна”.

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

(048) 766-91-61; email: [jsukraine@ukr.net](mailto:jsukraine@ukr.net); [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)

