

Інструкція із застосування медичного виробу

Системи переливання інфузійних розчинів стерильні одноразового використання з голками та без голок

№ п/п	Модифікація виробу
1	Система переливання інфузійних розчинів (світлозахищена), з внутрішньовенною голкою та металевою голкою до ємності
2	Система переливання інфузійних розчинів, з внутрішньовенною голкою та металевою голкою до ємності

Призначення: для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів.

Характеристики: Виготовлена з полівінілхлориду; металева атравматична голка з трьохгранною заточкою; розмір ін'єкційної голки 0,8*38 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Перекрити регулятори потоку (затискач), зняти захисний ковпачок з голки, вставити голку в пробку флакона з інфузійним препаратом, фізіологічним або іншим розчином.
3. Зачекати, поки інфузійний препарат (розчин) заповнить крапельну камеру до половини (натиснути на неї).
4. Відкрити регулятор потоку (затискач) і видалити повітря з гнучкої трубки (заповнити трубку розчином) до появи краплі, тепер система готова до застосування.
5. Відповідно до вимог відрегулювати швидкість введення розчину (20 краплин рідини, що вводиться, = 1мл±0,1мл).
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.

tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua



UA.TR.039